

INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE

PROTECTIV® Rainbow

ATENȚIONARE

Pentru a vă proteja sănătatea și a altora, este foarte important să urmați aceste instrucțiuni de utilizare.

- Purtați această mască atunci când sunteți **în contact cu alte persoane decât cele cu care locuiți**.
- Verificați întotdeauna dacă masca este **bine ajustată și vă acoperă gura și nasul**.
- Atenție: dacă sunteți bolnav, această mască nu este potrivită. Solicitați opinia medicului dumneavoastră.
- Această mască nu este destinată personalului medical.
- **Această mască nu înlocuiește gesturile de protecție** (spălarea regulată a mâinilor, distanțarea fizică, reducerea contactului cu alte persoane). **Aceasta adaugă o barieră fizică, în special pentru utilizare atunci când sunteți în contact strâns cu alte persoane.**




ACEST KIT CONȚINE:

- ✓ 1 mască de protecție PROTECTIV® Rainbow
- ✓ 2 curele elastice
- ✓ 1 suport pentru cap
- ✓ 10 « mono » filtre care pot fi curățate de 20 de ori
- ✓ 66 « tri » filtre care pot fi curățate de 10 de ori (1 utilizare = 3 filtre)
- ✓ 1 textil elastic

Cum să se diferențieze filtrele:

Un « mono » filtru este mai dens decât un « tri » filtru.

Puteți identifica cu ușurință cele 2 filtre vizual. « Mono » filtrul este mai alb și mai opac decât « tri » filtrul.

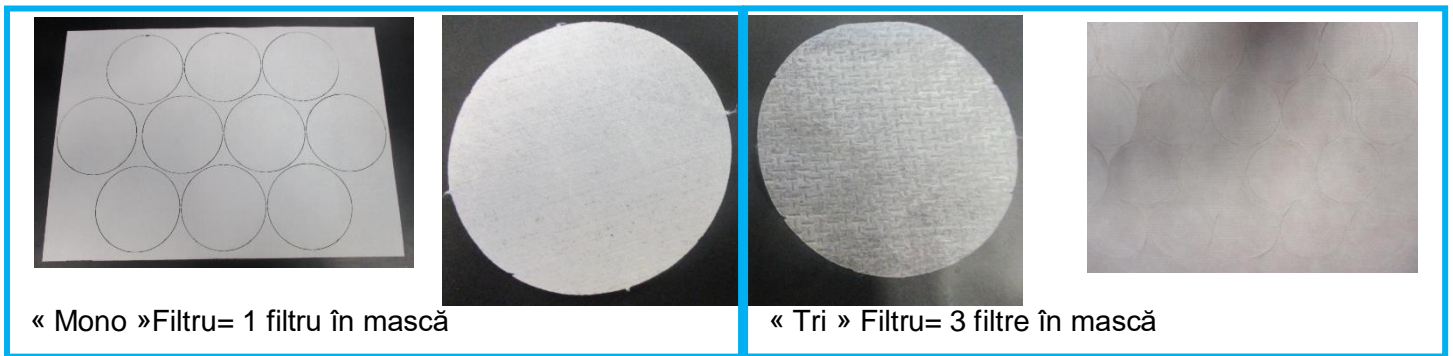

« Mono » Filtru= 1 filtru în mască


« Tri » Filtru= 3 filtre în mască

Funția filtrelor	Respirabilitate	Protecție
Tri (3 filtre)	+++	++
Mono (1 filtru)	++	+++

CUM SĂ ASAMBLAȚI MASCA ?

Asamblarea măștii:

- Înainte de a atinge elementele măștii și filtrele acestora, spălați-vă mâinile cu apă și săpun sau cu o soluție hidroalcoolică.
- Inspectați masca, filtrele și curelele elastice. Asigurați-vă că nu există găuri anormale, rupturi sau deteriorări.

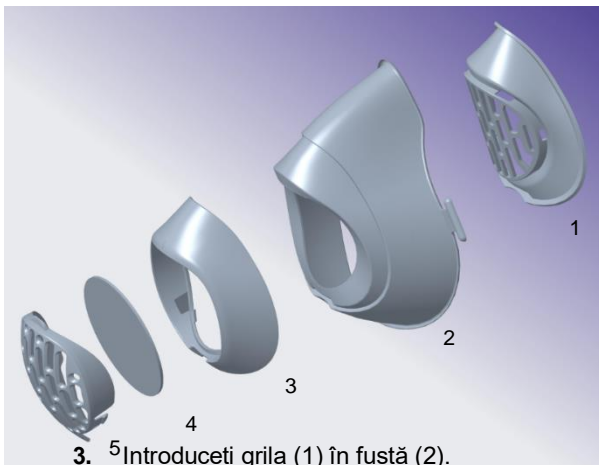

Compoziția kitului:

- Grilă
- Fustă termoformabilă
- Suport pentru filtru
- Filtru
- Clemă de închidere
- Curele elastice (x2)
- Suport pentru cap



- Introduceți grila (1) în fustă (2).
- Prindeți suportul filtrului (3) pe grilă (1) prin fustă (2).
- Așezați filtrul (4) pe grila urmărind fotografia de mai jos.



6. Introduceți clema de închidere (5) în fanta prevăzută în acest scop.
7. Reglați cele 2 curele elastice (6) pe suportul pentru cap (7).



8. Pentru a verifica etanșeitatea măștii, acoperiți capătul măștii cu palma și inspirați.
9. Masca este concepută astfel încât să o puteți termoforma singuri urmând procedura (consultați instrucțiunile de mai jos), în cazul în care nu se potrivește perfect conturului feței.
10. **Înainte de prima utilizare, curățați masca montată (consultați instrucțiunile de la pagina 3).**

Termoformare de casă:

1. Dacă masca nu se potrivește perfect feței tale, o poți termoforma acasă.
2. Aduceți puțină apă la fierb într-o cratiță.
3. Pe cratiță, așezați o strecurătoare pe care așezați masca cu fața în jos pe fund, fără filtru.
4. Lăsați-o să ia temperatura un minut.
5. Aduceți masca aproape de față, verificând dacă nu este fierbinte (inerție termică puternică, astfel încât masca să nu fie foarte fierbinte) și așezați-o pe față pentru a o conforma.
6. Blocați piesa bucală cu palma și inspirați câteva secunde.
7. Eliberați, masca este personalizată pe fața dumneavoastră !

Introducerea filtrului:

1. Inspectați filtrul. Asigurați-vă că nu există găuri anormale, rupturi sau deteriorări.
2. **Opțiunea 1: Introduceți 1 « Mono » filtru** în suportul filtrului și închideți capacul în siguranță prin fixarea acestuia în creștătură.
3. **Opțiunea 2: Introduceți 3 « Tri » filtre** în suportul filtrului și închideți capacul în siguranță prin fixarea acestuia în creștătură.
4. **Atenție : filtrarea de categoria 1 * a acestei măști este garantată numai cu utilizarea filtrelor furnizate.**

* Consultați raportul: [mgp\8888_Dedienne\Media 4\Dedienne_Media 4_15072020_13h00.pdf](#)

CUM SE PORTĂ MASCA?

Pentru a pune masca:

1. Țineți masca de cârligul din spate.
2. Așezați-o la nivelul gurii.
3. Poziționați sistemul de legare în partea de sus a capului. Puteți regla etanșeitatea reglând creștăturile curelelor elastice.
4. Masca trebuie să acopere nasul, gura și bărbia.

Când o purtați :

1. Se recomandă purtarea măștii pe pielea goală.
2. Evitați atingerea și mutarea acesteia. Nu o puneți niciodată într-o poziție de așteptare pe frunte sau pe bărbie.
3. Dacă trebuie să înlocuiți masca, luați-o de cele 2 „urechi” atașate la curelele elastice.

Filtrele și cartușul de filtrare trebuie schimbate:

1. Când ați purtat masca 4h.
2. Când devine dificil să respirați.
3. Dacă masca se udă puternic.

Dacă rămâneți fără filtre:

Doar în caz de urgență și pentru utilizare care **nu depășește 4 ore**, masca este compatibilă cu **discurile de demachiere standard**.

Trebuie să schimbi masca (în mod excepțional):

Dacă masca este deteriorată.

Pentru a scoate masca:

1. **Spălați-vă mâinile cu apă și săpun sau cu o soluție hidroalcoolică.**
2. Apucați ancorele laterale situate la capetele măștii pentru a o ridica de pe față, fără a atinge părțile interioare ale măștii.
3. În timp ce așteptați să o spălați și filtrele sale, izolați-o într-o pungă etanșă curată.
4. **În cele din urmă: spălați-vă mâinile din nou cu apă și săpun sau cu o soluție hidroalcoolică.**

CUM SĂ VĂ ÎNTREȚINEȚI MASCA?

Înainte de deschidere:

Păstrați masca în ambalajul original de protecție, într-un loc uscat și în afara razelor solare directe. Depozitați-o la o umiditate maximă de 75% și la o temperatură între -2 ° C. și + 55 ° C pentru a-și păstra toate caracteristicile.

Pentru a o spăla:

1. Pentru a vă spăla masca, vă recomandăm o spălare în mașina de spălat vase sau în apă fierbinte la **60 ° C, timp de cel puțin 30 de minute prin îndepărtarea curelelor elastice, pe care le puteți spăla cu apă cu săpun sau cu un șervețel dezinfectant (de preferință organic).**
Sfaturi: o puteți fierbe și într-o cratiță sau fierbător, **mai ales prin îndepărtarea curelelor elastice.**
Pentru o curățare temeinică, nu ezitați să dezasamblați complet toate părțile piesei de mască.
2. **Filtrele pot fi curățate de 10 ori la o temperatură de 60 ° C timp de 30 de minute.** Vă recomandăm să le așezați într-un vas în cuptor cel puțin 30 de minute, menținând o temperatură de 60 ° C.
3. După ce ați atins masca și filtrele, spălați-vă mâinile cu apă și săpun sau cu o soluție hidroalcoolică.
4. « Mono » filtrele au fost testate pentru 20 de curățări.
« Tri » filtrele au fost testate pentru 10 curățări.
Dincolo de asta, filtrarea măștii nu mai este garantată.

După spălare:

1. Uscați întreaga mască și filtrele în aer liber **pe o suprafață curată și dezinfectată.**
2. Dacă este necesar, filtrele pot fi călcate la temperatură scăzută.
3. Odată ce masca și filtrele sunt uscate, depozitați-le într-un pachet curat și etanș (pungă de plastic sau pungă pentru congelator, de exemplu).

SECURITATE

1. Filtrele au demonstrat o eficiență de filtrare de 99% pentru particulele de 3 microni emise de persoana care poartă masca (mgp \ 8888_Dedienne \ Media 4 \ Dedienne_Media 4_15072020_13h00.pdf.)
2. Respirabilitatea măștii a fost măsurată la > 96 L.m-2.s-1 și trebuie să permită purtarea acesteia pentru o perioadă de 4 ore.

ATENȚIONARE

În ciuda tuturor grijilor acordate la fabricarea acestui kit, este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului și, în niciun caz, a producătorului sau furnizorului, să se asigure că masca corespunde caracteristicilor mediului de lucru. Recomandările și metodele de utilizare descrise mai sus trebuie respectate scrupulos.



ATENȚIONARE : În anumite condiții de frig și/ sau umiditate, se poate observa un fenomen de condensare.

Acest lucru nu afectează în niciun fel capacitățile de filtrare ale măștii. O simplă ștergere pe interiorul fustei este suficientă pentru a elimina acest fenomen.

Această mască Protectiv® Rainbow nu este nici EIP conform Regulamentului (UE) nr. 2016/425, nici un dispozitiv medical conform Directivei 93/42 / CEE. Cu toate acestea, suntem în curs de obținere a aprobării pentru a respecta aceste standarde.