

NOTICE D'UTILISATION

PROTECTIV® Rainbow

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- Portez ce masque quand vous êtes **en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.**
- Vérifiez toujours que le masque est **bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.**
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction -des contacts avec d'autres personnes). **Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.**




CE KIT CONTIENT :

- ✓ 1 masque barrière PROTECTIV® Rainbow
- ✓ 2 lanières élastiques
- ✓ 1 support de tête
- ✓ 10 filtres « mono » nettoyables 20 fois
- ✓ 66 filtres « tri » nettoyables 10 fois (1 utilisation = 3 filtres)
- ✓ 1 élastique textile

Comment différencier les filtres :

Un filtre « mono » est plus dense qu'un filtre « tri ».

On peut facilement identifier les 2 filtres visuellement. Le filtre « mono » est plus blanc et plus opaque que le filtre « tri ».

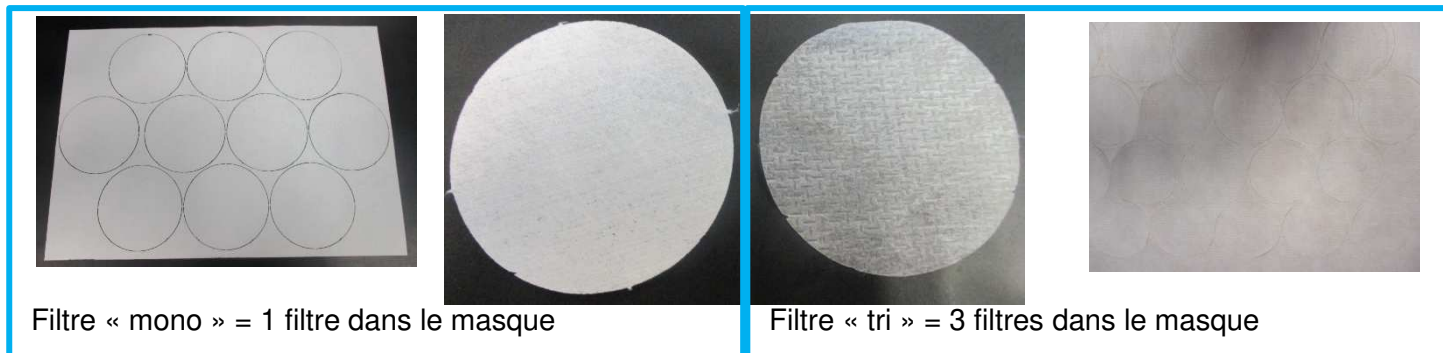


Fonction des filtres	Respirabilité	Protection
Tri (3 filtres)	+++	++
Mono (1 filtre)	++	+++

COMMENT ASSEMBLER LE MASQUE ?

Montage du masque :

1. Avant de toucher les éléments du masque et ses filtres, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique.
2. Inspectez le masque, les filtres et ses lanières élastiques. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de trous anormaux, déchirures ou dégradations.

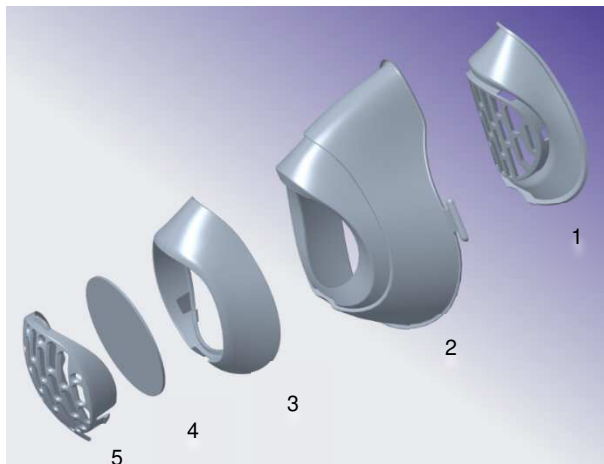

Composition du kit :

- 1- Grille
- 2- Jupe thermoformable
- 3- Support filtre
- 4- Filtre
- 5- Clip de fermeture
- 6- Lanières élastiques (x2)
- 7- Support de tête



3. Montez la grille (1) dans la jupe (2).
4. Clipsez le support filtre (3) sur la grille (1) au travers de la jupe (2).
5. Placez le filtre (4) sur la grille suivant photo ci-dessous.



6. Montez le clip de fermeture (5) dans l'encoche prévue à cet effet.
7. Réglez les 2 lanières élastiques (6) sur le support de tête (7).



8. Pour vérifier l'étanchéité du masque, bouchez son l'extrémité avec la paume de la main et inspirez.
9. Le masque est conçu afin que vous puissiez le thermoformer vous-même suivant la procédure (voir instructions ci-dessous), dans le cas où il n'épouserait pas parfaitement le contour de votre visage.
10. **Avant le premier usage, nettoyez le masque monté (voir instructions page 3).**

Thermoformage maison :

1. Si le masque n'épouse pas parfaitement votre visage, vous pouvez le thermoformer à la maison.
2. Faites bouillir de l'eau dans une casserole.
3. Sur votre casserole, posez une passoire sur laquelle vous déposez le masque face visage contre fond, sans le filtre.
4. Laissez-le prendre la température pendant une minute.
5. Approchez le masque contre votre visage **en vérifiant qu'il n'est pas brûlant** (inertie thermique forte donc le masque n'est pas très chaud) et apposez-le sur votre visage pour le conformer.
6. Bloquez l'embout avec la paume de la main et inspirez quelques secondes.
7. Relâchez, le masque est personnalisé à votre visage !

Insertion du filtre :

1. Inspectez le filtre. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de trous anormaux, déchirures ou dégradations.
2. **Option 1 : Insérez 1 filtre « Mono »** dans le porte-filtre et refermez bien le couvercle en le clipsant dans l'encoche.
Option 2 : Insérez 3 filtres « Tri » dans le porte-filtre et refermez bien le couvercle en le clipsant dans l'encoche.
3. **Attention : la filtration catégorie 1* de ce masque n'est garantie qu'avec l'utilisation des filtres fournis.**

**Consulter rapport: mgp\8888_Dedienne\Media 4\Dedienne_Media 4_15072020_13h00.pdf*

COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Pour mettre le masque :

1. Tenez le masque par l'accroche arrière.
2. Placez-le au niveau de votre bouche.
3. Positionnez le système d'attache sur le haut de votre tête. Vous pouvez ajuster le serrage en réglant les crans des lanières élastiques.
4. Le masque doit recouvrir le nez, la bouche et le menton.

Lorsque vous le portez :

1. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue.
2. Évitez de le toucher et de le déplacer. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.
3. Si vous avez besoin de replacer votre masque, le prendre par les 2 « oreilles » d'accroche des lanières élastiques.

Il faut changer les filtres et la cartouche filtrante :

1. Quand vous avez porté le masque 4h.
2. Quand il devient difficile de respirer.
3. Si le masque s'humidifie fortement.

Si vous êtes à court de filtres :

En cas de secours uniquement et pour une utilisation n'excédant **pas plus de 4 heures**, le masque est compatible avec des **disques démaquillants standards**.

Il faut changer le masque (exceptionnellement) :

Si le masque est endommagé.

Pour ôter le masque :

1. **Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.**
2. Attrapez les ancrs latérales situées sur les extrémités du masque afin de le décoller de votre visage, sans toucher les parties intérieures du masque.
3. En attendant de le laver, ainsi que ses filtres, isolez-le dans un sachet hermétique propre.
4. **Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro- alcoolique.**

COMMENT ENTREtenir SON MASQUE ?

Avant ouverture :

Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

Pour le laver :

1. Pour laver votre masque, nous préconisons un lavage au lave-vaisselle ou dans l'eau chaude à **60°C, pendant 30 minutes minimum en enlevant bien les lanières élastiques, que vous pouvez laver avec de l'eau savonneuse ou une lingette désinfectante (de préférence bio).**
Astuces : Vous pouvez également le faire bouillir dans une casserole ou une bouilloire, **surtout en enlevant bien les lanières élastiques.**
Pour un nettoyage en profondeur, n'hésitez pas à démonter intégralement toutes les pièces de la partie masque.
2. **Les filtres sont nettoyables 10 fois à une température de 60°C pendant 30 minutes.** Nous recommandons de les disposer dans un plat au four pendant 30 minutes minimum, en maintenant une température de 60°C.
3. Après avoir touché le masque et les filtres, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.
4. Les filtres « mono » ont été testés pour 20 nettoyages. Les filtres « tri » ont été testés pour 10 nettoyages.
Au-delà, la filtration du masque n'est plus garantie.

Après lavage :

1. Faites sécher le masque et les filtres dans leur intégralité, à l'air libre **sur un support propre et désinfecté.**
2. Si besoin, les filtres peuvent être repassés à basse température.
3. Dès que le masque et les filtres sont secs, stockez-les dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).

SÉCURITÉ

1. Les filtres ont démontré une efficacité de filtration de 99 % pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque (mgp\8888_Dedienne\Media 4\Dedienne_Media 4_15072020_13h00.pdf.)
2. La respirabilité du masque a été mesurée à > 96 L.m-2.s-1 et doit permettre son port pour une durée de 4h.

AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce kit, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.



AVERTISSEMENT : Dans certaines conditions de froid et/ou d'humidité, un phénomène de condensation peut être observé.
Cela ne remet nullement en cause les capacités de filtration du masque. Un simple essuyage sur l'intérieur de la jupe suffit à éliminer ce phénomène.

Ce masque Protectiv® Rainbow n'est ni un EPI selon le règlement (UE) N°2016/425, ni un dispositif médical selon la directive 93/42/CEE. Nous sommes cependant en cours d'homologation pour être conforme à ces standards.